



Modelo HEM-6232T Manual de Instruções

All for Healthcare

Sumário

- Introdução
Informações de segurança importantes
1. Conheça seu monitor
2. Preparação
3. Como usar seu monitor sem um dispositivo inteligente
4. Como usar seu monitor junto com um dispositivo inteligente
5. Como usar a função de memória
6. Outras configurações
7. Mensagens de erro e solução de problemas
8. Manutenção
9. Como recarregar e descartar o monitor e as pilhas
10. Especificações
11. Garantia
12. Orientações e declaração do fabricante

Introdução
Obrigado por adquirir o Monitor de Pressão Arterial de Pulso OMRON HEM-6232T. Este é um monitor de pressão arterial em seu pulso...

Informações de segurança importantes


Leia as informações de segurança importantes neste manual de instruções antes de usar o monitor. Para sua segurança, siga este manual de instruções em sua totalidade.

Advertência

Indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for evitada, pode resultar em morte ou ferimentos graves.
O monitor não deve ser usado para a medição invasiva.
NÃO ajuste a medição segundo as instruções deste monitor de pressão arterial...

Cuidado
Indica uma situação que pode ser perigosa e, se não for evitada, poderá resultar em lesão leve ou moderada do usuário ou paciente ou danificar o equipamento ou outros bens.

1. Conheça seu monitor
1.1 Conteúdo
Monitor, 2 (duas) pilhas alcalinas AAA, estojo, manual de instruções, instruções de configuração
1.2 Monitor

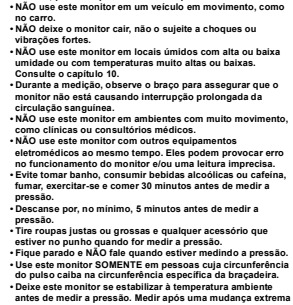

2. Preparação
2.1 Como instalar as pilhas
2.2 Como configurar data e hora
2.3 Como configurar o indicador de posicionamento
2.4 Como configurar o modo de medição
2.5 Como configurar o modo de armazenamento

3. Como usar o monitor
3.1 Como usar o monitor sem um dispositivo inteligente
3.2 Como usar o monitor junto com um dispositivo inteligente
3.3 Como usar a função de memória
3.4 Outras configurações

4. Como usar o monitor junto com um dispositivo inteligente
4.1 Como conectar seu monitor a um dispositivo inteligente
4.2 Como configurar o modo de medição
4.3 Como configurar o modo de armazenamento

5. Como usar o monitor sem um dispositivo inteligente
5.1 Como realizar uma medição
5.2 Como configurar o modo de medição
5.3 Como configurar o modo de armazenamento

6. Outras configurações
7. Mensagens de erro e solução de problemas
8. Manutenção
9. Como recarregar e descartar o monitor e as pilhas
10. Especificações
11. Garantia
12. Orientações e declaração do fabricante

Indicador de posicionamento
O monitor tem um indicador embuído de posicionamento avançado, que é usado para ajudar a determinar se o monitor está na altura correta.

Simbolo de batimentos cardíacos irregulares
Aparecerá na leitura quando se detectar um ritmo irregular 2 (duas) ou mais vezes durante a medição.

Simbolo de erro de movimento
Aparecerá na leitura quando você mover o corpo durante a medição. Se aparecer, remova a braçadeira de pulso e aguarde de 2 a 3 minutos.

Definições de 2013 da ESH/ESC para o manejo da hipertensão arterial

Table with 2 columns: Consultório and Casa. Rows for Pressão arterial sistólica and Pressão arterial diastólica.

Advertência
NUNCA diagnostique ou trate a si mesmo segundo suas próprias leituras. SEMPRE consulte seu médico.

2. Preparação

- 2.1 Como instalar as pilhas
2.2 Como configurar data e hora
2.3 Como configurar o indicador de posicionamento
2.4 Como configurar o modo de medição
2.5 Como configurar o modo de armazenamento

Observações
Quando o simbolo piscar no visor, estará na hora de trocar as pilhas.
Para trocar as pilhas, desligue o monitor e remova todas as pilhas.

2.2 Como configurar data e hora
Observações
Configure o monitor com a data e a hora corretas antes de medir a pressão pela primeira vez.

3. Aperte o botão START/STOP para armazenar a configuração.
Ele se designará automaticamente após 3 segundos.

2.3 Dicas para medir a pressão arterial
Para garantir uma leitura precisa, siga estas orientações:
O estresse aumenta a pressão arterial.

2.4 Como colocar a braçadeira no pulso
Os seguintes passos devem ser seguidos para colocar a braçadeira no pulso esquerdo.

Advertência
Tire roupas justas ou grossas e qualquer acessório que estiver no pulso quando for medir a pressão.

- 1. Coloque a braçadeira no pulso esquerdo.
2. Passe o braço pela abertura da braçadeira.
3. Posicione a braçadeira de pulso deixando uma folga de aproximadamente 1 a 2 cm entre a braçadeira e a parte inferior da palma.

Observações
Quando o simbolo piscar no visor, estará na hora de trocar as pilhas.
Para trocar as pilhas, desligue o monitor e remova todas as pilhas.

Observações
Certifique-se de que a braçadeira de pulso não esteja cobrindo a parte saliente do osso na corbina externa do pulso.

2.5 Como sentar-se corretamente
Para medir a pressão, você precisa estar relaxado e sentado confortavelmente em um local com temperatura ambiente.

2.6 Como selecionar a ID de um usuário
Seu monitor foi projetado para medir e armazenar as leituras na memória de 2 (duas) pessoas usando o botão para troca de usuário.

3. Como usar seu monitor sem um dispositivo inteligente
3.1 Como realizar uma medição
Seu monitor foi projetado para medir e armazenar as leituras na memória de 2 (duas) pessoas usando o botão para troca de usuário.

Observações
Para interromper a medição, pressione o botão START/STOP uma vez para desinserir a braçadeira de pulso.

1. Pressione o botão START/STOP. Todos os símbolos aparecem no visor antes do monitor começar a medir a pressão.

2. Verifique o indicador de posicionamento. O monitor tem um indicador embuído que indica a região do coração, que é usado para ajudar a determinar se o monitor está na altura correta.

3. Abra o aplicativo em seu dispositivo inteligente e siga as instruções.

Observações
Se o simbolo 'Err' aparecer, siga as instruções no aplicativo 'OMRON connect'.

Table with 2 columns: Altura do monitor and Indicador de posicionamento. Rows for Pulso muito para cima, Bem posicionado, Pulso muito para baixo.

Observações
Depois de pressionar o botão START/STOP por 5 segundos, mesmo sem estar bem posicionado, o monitor começará a medir a pressão e a braçadeira começará a se inflar.

3. Fique parado e não se mova ou fale antes de todo o processo de medição estar concluído.
A medida que a braçadeira se infla, o monitor determinará automaticamente o nível ideal de enchimento.

Observações
O simbolo piscará a cada batimento cardíaco.

Após o monitor detectar a pressão arterial e a frequência cardíaca, a braçadeira irá desinflar automaticamente.
A pressão arterial e a frequência cardíaca serão exibidas. Se a leitura sistólica ou diastólica estiver alta (consulte a seção 1.3), o símbolo aparecerá.

4. Aperte o botão START/STOP para desligar o monitor.
Observações
O monitor desligará automaticamente após 2 minutos.

4.1 Como conectar seu monitor a um dispositivo inteligente
A data e a hora de seu monitor serão configuradas automaticamente quando você conectar o monitor a um dispositivo inteligente.

4.2 Como configurar o modo de medição
Para medir a pressão, siga as instruções da seção 3.1. Os dados coletados pelo monitor serão transferidos para o aplicativo em seu dispositivo inteligente.

Observações
Se o simbolo 'Err' aparecer, siga as instruções no aplicativo 'OMRON connect'.

4.3 Como configurar o modo de armazenamento
Para armazenar as leituras na memória de 2 (duas) pessoas, pressione o botão para troca de usuário.

Observações
Quando o simbolo piscar no visor, estará na hora de trocar as pilhas.

4.4 Como realizar uma medição
Para medir a pressão, siga as instruções da seção 3.1. Os dados coletados pelo monitor serão transferidos para o aplicativo em seu dispositivo inteligente.

Observações
Se o simbolo 'Err' aparecer, siga as instruções no aplicativo 'OMRON connect'.

